

ALL IN[®]
ADVANCED
micerium Il nuovo allineatore invisibile

**UN'ALTERNATIVA
TUTTA ITALIANA**

**IL TRATTAMENTO
ORTODONTICO
INVISIBILE
PER TUTTI**





ALL IN
ADVANCED
micerium Il nuovo allineatore invisibile

CONSIGLI UTILI PER IL PAZIENTE

1. QUANTO TEMPO PORTARE LA MASCHERINA: La mascherina di allineamento va portata sempre, escluso durante i pasti e la pulizia dei denti. È bene evitare di masticare chewing-gum con le mascherine.

2. ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE: Per inserire l'allineatore è sufficiente calzarlo sull'arcata e premere leggermente con le dita. Per rimuovere l'allineatore: sollevare leggermente l'allineatore prima dalla parte posteriore (dai molari) destra e sinistra insieme. Contemporaneamente sollevare leggermente nei punti dove sono presenti attachments (seguire le istruzioni del vostro Ortodontista).

3. ALIMENTAZIONE: La mascherina va tolta durante i pasti, quindi non occorre modificare le proprie abitudini di alimentazione. Dopo ogni pasto, prima di rimontare le mascherine, va effettuata un'accurata pulizia dei denti con spazzolino e filo interdentale.

4. FUMATORI: Si consiglia di NON fumare con indosso gli allineatori, per evitare di macchiarli o di alterarne l'invisibilità.

5. PULIZIA MASCHERINE: Per la pulizia si può utilizzare il normale spazzolino e sciacquare con acqua tiepida. Prima di rimontare le mascherine bisogna ricordarsi sempre di lavare i denti e passare il filo interdentale.

6. CONSERVAZIONE MASCHERINE: Si consiglia di riporre le mascherine nell'apposito astuccio.

7. VISITE DAL DENTISTA: Salvo diverse indicazioni del Medico Ortodontista, si consiglia di passare per una visita di controllo ogni 4/6 settimane.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO: La durata è simile a quella dei trattamenti con apparecchiature tradizionali, ovvero può variare da 8 a 18 mesi in base alla tipologia di trattamento. Maggiori informazioni saranno fornite dal Medico Ortodontista. Ad ogni cambio di mascherina si può avvertire un senso di fastidio, questo è normale perché la mascherina diventa attiva per la risoluzione del trattamento. Questo leggero fastidio scompare entro uno/due giorni.



Distributore esclusivo

Micerium S.p.A., Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge) - Italy
Tel. (+39) 0185 7887 850 • Fax (+39) 0185 7887 950 • e-mail: ortho@micerium.it • www.micerium.com

Fabbricante

Micerium Lab, Sede operativa Via delle Eriche 78 - 16148 Genova (GE) produzione@allineatoriin.it • commerciale@allineatoriin.it